



**Medikal Hijyen
Ürünleri Katalođu**



Medikal Hijyen

İçerikler

4 s. Cilt ve El Dezenfektanları

Acisept DZ 21

Antibakteriyel Etkili Alkol Bazlı El Dezenfektanı

Acisept DZ 21 Jel

Antibakteriyel Etkili Alkol Bazlı El Dezenfektanı

Fastec Acihand H 02

Hijyenik Ve Cerrahi El Dezenfektanı
(Antibakteriyel - Antifungal - Antiviral)

VGB Iodine 30

Povidon-İyodin Solüsyonu İle Cerrahi Ve Hijyenik Antibakteriyel El Yıkama

8 s. Zemin ve Yüzey Dezenfektanları

D 20

Concentrated Hygienic Cleaner for Floors and Surfaces (Antibacterial - Antifungal)

D 20 RFU Spray

Ready-to-Use Cleaner for Floors and Surfaces - Antibacterial, Antifungal

AL 400

Antibakteriyel Antifungal Hızlı Yüzey Temizleyici Alkol Bazlı

11 s. Tıbbi Cihazlar İçin Temizlik Maddeleri

PA Powder

Aktif Oksijen İçeren Yüksek Etkili Toz Dezenfektan

Dental FD 44

Diş Kliniklerinde Kullanılan Alet, Ekipman Ve Yüzeyler İçin Dezenfektan

PK 01

Cerrahi Aletler İçin Pas Sökücü Ve Korozyon Önleyici

FY 90

Cerrahi Aletler İçin Yağlayıcı

Endex Liquid

Tıbbi Aletlerin Ön Temizliği İçin Konsantre Enzim Solüsyonu

Fastec Power 300

Çamaşır Ve Dezenfeksiyon Makineleri İçin Alkali Temizleyici

H912

Ameliyat Sterilizatörü ve Patoloji Otoklavı İçin %37'lik Formaldehit Çözeltisi





Acidex **Acisept DZ 21**

Antibakteriyel Etkili Alkol Bazlı El Dezenfektanı

Özellikle sağlık ve tıbbi ortamlarda (hastaneler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, diş hekimliği, oteller, restoranlar ve gıda sanayi) el hijyeninin sağlanması amacıyla kullanılır.

- Mikroorganizmalara karşı klinik olarak kanıtlanmış geniş bir etki spektrumuna sahiptir, antibakteriyel ve antifungal etki sağlar.
- Cildi nemlendirici maddeler içerir.
- Uçucu ve etkili formülü sayesinde ellerinizin cildini korur ve nemlendirir. Tahrişe neden olmaz. Dermatolojik olarak test edilmiştir.
- Kullanıma hazırdır. Ürün kolayca yayılıyor ve 30 saniyede kuruyor.

BİLEŞİMİ: Her 100 ml içeriğinde:
Aktif Maddeler:
Etkin içerikler:
%70 izopropil alkol
Yardımcı maddeler: gliserin,
aloe vera, pH düzenleyiciler.

Mikroorganizmalar	Uygulama Alanı	Dozu	Temas Süresi	Uygulama Aralığı
Staphylococcus aureus ATCC 6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Escherichia coli K12 NCTC 10538 Enterococcus hirae ATCC 10541 Candida Albicans ATCC 10231	Tıbbi tesislerde kullanılan, antibakteriyel etkili alkol bazlı el temizleyicisi - durulama gerektirmez.	Üründen 2 ml ellerinize uygulayın ve tamamen kuruyana kadar ovun.	60 saniye	Günde en fazla 3 kez

Ürün Kodu: ACX03.004.1 ACX03.004.5
Ambalaj: 1 L (0,87 Kg) 5 L (4,35 Kg)
Koli içi: 16 adet 4 adet





Acidex **Acisept DZ 21 Jel** Antibakteriyel Etkili Alkol Bazlı El Dezenfektanı

Özellikle sağlık ve tıbbi ortamlarda (hastaneler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve el hijyeninin kesinlikle gerekli olduğu diğer alanlar) el hijyeninin sağlanması amacıyla kullanılır. Daha kolay kullanılabilen jel formülü.

- Mikroorganizmalara karşı klinik olarak kanıtlanmış geniş bir etki spektrumuna sahiptir, antibakteriyel ve antifungal etki sağlar.
- Cildi nemlendirici maddeler içerir.
- Uçucu ve etkili formülü sayesinde ellerinizin cildini korur ve nemlendirir. Tahrişe neden olmaz. Dermatolojik olarak test edilmiştir.
- Kullanım kolaylığı sağlayan jel formu sayesinde pratik ve hijyenik kullanım.

BİLEŞİMİ: Her 100 ml içeriğinde:

Aktif Maddeler:

%70 izopropil alkol

Yardımcı maddeler: gliserin, aloe vera, pH düzenleyiciler, koyulaştırıcı.

Mikroorganizmalar	Uygulama Alanı	Dozu	Temas Süresi	Uygulama Aralığı
Staphylococcus aureus ATCC 6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Escherichia coli K12 NCTC 10538 Enterococcus hirae ATCC 10541 Candida Albicans ATCC 10231	Tıbbi tesislerde kullanılan, antibakteriyel etkili alkol bazlı el temizleyicisi - durulama gerektirmez.	Üründen 2 ml ellerinize uygulayın ve tamamen kuruyana kadar ovun.	60 saniye	Günde en fazla 3 kez

Ürün Kodu: ACX03.006.1 ACX03.006.5
Ambalaj: 1 L (0,9 Kg) 5 L (4,5 Kg)
Koli içi: 16 adet 4 adet





Fastec **Acihand H 02**

Hijyenik Ve Cerrahi El Dezenfektanı (Antibakteriyel - Antifungal - Antiviral)

Gelişmiş antibakteriyel formülü, en yüksek güvenlik ve hijyen standartlarını koruyarak sık kullanımda tıbbi ortamlarda güvenilir el hijyeni sağlar.

- Hijyenik dezenfektan: Geniş spektrumlu antimikrobiyal etki sayesinde özellikle enfeksiyon riskinin yüksek olduğu alanlarda el hijyenini sağlar.
- Yumuşak ve nemlendirici: İçerdiği nemlendirici maddeler ve cilde dost pH seviyesi sayesinde ellerinizin cildini tahriş etmez.
- Evrensel kullanım: Hastane, restoran, otel ve endüstriyel alanlarda kullanıma uygundur. Dermatolojik olarak test edilmiştir.

BİLEŞİMİ: Her 100 ml içeriğinde:

Aktif Maddeler:

Klorheksidin biglukonat


Desil glikozitler.

Yardımcı maddeler: gliserin, aloe vera.

Mikroorganizmalar	Uygulama Alanı	Uygulama Dozu	Temas Süresi	Uygulama Aralığı
Staphylococcus aureus ATCC 6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Escherichia Coli K12 NCTC 10538 Enterococcus hirae ATCC 10541	Kamusal ve kişisel alanlarda, ayrıca tıbbi alanda, personelin el temizliğini sağlamak için kullanılır.	Doğrudan uygulama için 2 ml	60 saniye	Günde en fazla 3 kez
Poliovirus Type 1, LSc-Zab; Adenovirus Type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5; Murine norovirus, strain 599 Berlin Vaccinia virus strain Ankara(mva)ATCC VR-1508	Ellere uygulayın, köpiyene kadar ovun, ardından bol su ile iyice durulayın.		2 saniye	

Ürün Kodu:	FTC12.003.5	FTC12.003.1	FTC12.003.20
Ambalaj:	1 L (1 Kg)	5 L (5 Kg)	20 L (20 Kg)
Koli içi:	16 adet	4 adet	4 adet



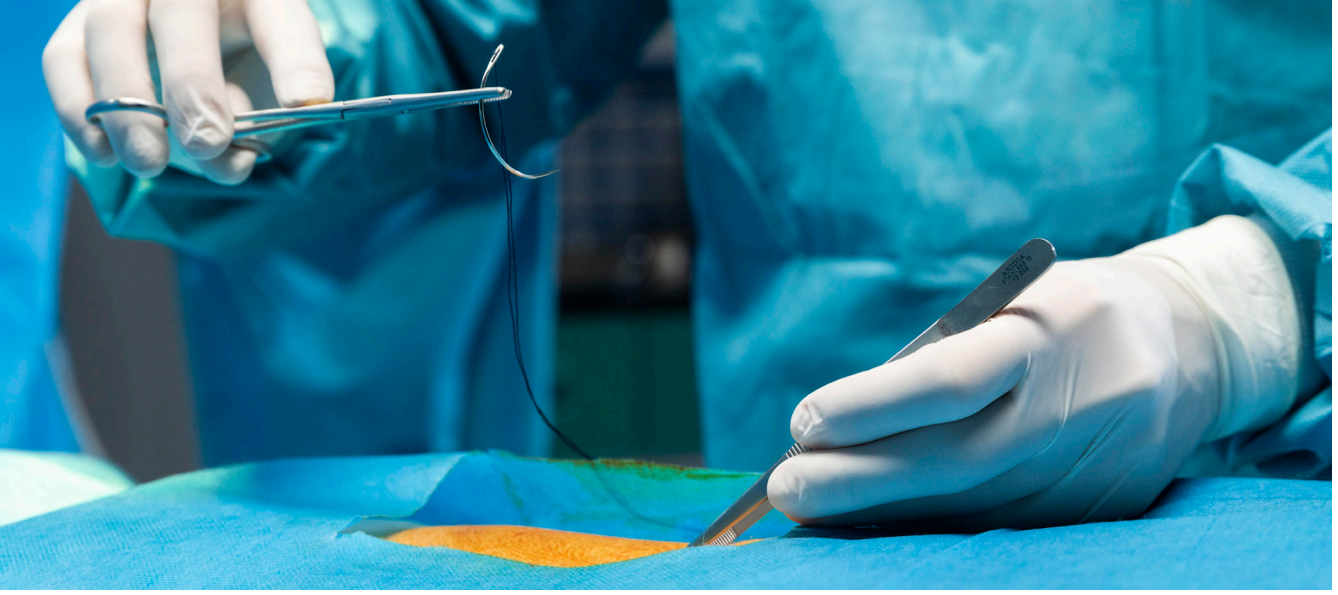

Acidex VGB Iodine 30

Povidon-İyodin Solüsyonu İle Cerrahi Ve Hijyenik Antibakteriyel El Yıkama

Sağlık sektöründe, özellikle hastane ve kliniklerde, kişisel ve cerrahi el hijyeninde, yara ve cerrahi bölge tedavisinde, tıbbi alet ve ekipmanların temizliğinde kullanılır.

- Çok işlevli: Yara tedavisinde sprey veya gazlı bezle uygulayın, aletleri temizlemek için daldırıp durulayın.
- Enfeksiyon koruması: Enfeksiyonu önler ve dokuların hızlı iyileşmesini sağlar.
- Kullanımı kolay: Gazlı bezle yaraya ve çevresine kolayca uygulanır, eşit şekilde kaplanmasını sağlar.
- Güvenlik: Dış mekânlarda güvenilir kullanım sağlar.

BİLEŞİMİ: Her 100 ml içeriğinde:

Aktif Maddeler:

10 g polivinilpirolidon iyot (PVP-I)
(1% iyot eşdeğeri)

- Yardımcı maddeler: alkol (C9-11) etoksilat (8EO), gliserin, pH tamponu.

Mikroorganizmalar	Uygulama Alanı	Uygulama Dozu	Temas Süresi
Staphylococcus aureus ATCC6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 Escherichia coli K12 NCTC10538 Enterococcus hirae ATCC10541	Kişisel ve cerrahi hijyenin yanı sıra yara ve cerrahi alanların hijyeninde kullanılır. Spreyleme, daldırma veya yıkama yoluyla uygulanır.	Hijyenik el yıkama: 3-5 ml ürün.	İhtiyaç halinde kullanılabilir.
		Cerrahi el yıkama: 5 ml ürün - 3 dakika.	
	Ekipman temizliğinde kullanılır. Püskürtme, daldırma veya yıkama yoluyla uygulanır.	Yaralar ve cerrahi alanlar: 20 cm ² 'ye 1 ml ürün - 5 dakika.	İhtiyaç halinde kullanılabilir.
		Alet ve ekipmanlar için: 1:40 ila 1:100 seyreltme oranında kullanın. Personel ayakkabılarının ve araçların plastik parçalarının temizliği için: 1:40 seyreltme oranında kullanın.	

Ürün Kodu:	ACX01.074.200ML	ACX01.074.500ML	ACX01.074.1	ACX01.074.5
Ambalaj:	250 ml (250 g)	500 ml (500 g)	1 L (1 Kg)	5 L (5 Kg)
Koli içi:	30 adet	12 adet	16 adet	4 adet





Acidex D 20

Zemin Ve Yüzeyler için Konsantre Hijyenik Temizlik Maddesi (Antibakteriyel-Antifungal)

Hijyenin mutlaka gerekli olduğu kurumlarda sert yüzeylerin (fayans, mermer, seramik, ahşap, PVC, deri) temizliği ve hijyenik bakımı için tasarlanmış, nötr pH değerine sahip konsantre bir üründür.

- Temizlik ve dezenfeksiyon: Alkoller ve kuaterner amonyum bileşikleri (QAC'ler) sayesinde etkilidir.
- Uyumluluk: İyonik olmayan bileşenleri sayesinde diğer dezenfektanlarla birlikte kullanıma uygundur.
- Güvenlik: Nötr pH (7), düzenli kullanıma uygundur.
- Çok Yönlülük: Protein kirleticilerini parçalar, her su sertliğinde ve sıcaklığında etkilidir.

BİLEŞİMİ: Her 100 ml içeriğinde:

Aktif Maddeler:

3,33 g didesildimetilamonyum klorür

3,33 g alkil dimetil benzil amonyum klorür

3,33 g alkil dimetil etil benzil amonyum klorür

• Yardımcı maddeler:

2 g Noniyonik yüzey aktif madde (okso alkol C 11 EO / PO)

Parfüm, Korozyon inhibitörü

Kompleks yapıcı.

Mikroorganizmalar	Uygulama Alanı	Uygulama Dozu ve Temas Süresi
S.Aureus(ATCC 6538) , Paeruginosa (ATCC 15442), E.hirae(ATCC 10541), E. coli (ATCC 10536)	Yüzeyler — Silme uygulamasıyla işlem	%7,5 – 1 dakika %1,0 – 5 dakika %0,5 – 5 dakika
C.Albicans (ATCC 10231), A.Brasiiliensis (ATCC 16404)		%7,5 – 5 dakika %1,0 – 15 dakika %0,5 – 15 dakika

Ürün Kodu: ACX02.021.5
Ambalaj: 5 L (5 Kg)
Koli içi: 4 adet





Acidex D 20 RFU Spray

Kullanıma Hazır Zemin Ve Yüzey Temizleyici - Antibakteriyel, Antifungal

Hastane, klinik, otel, okul ve hijyenin önemli olduğu diğer mekanlarda, fayans, tül, seramik, mermer, ahşap, PVC, deri kaplamalar ve benzeri yıkanabilir, temizlenebilir ve hassas sert yüzeylerin temizliği ve hijyenik bakımı için tasarlanmış nötr pH'lı üründür.

- Kullanıma hazır: Özel formülü sayesinde su ile seyreltilmesi gerekmez.
- Temizlik ve dezenfeksiyon: Alkoller ve kuarterner amonyum bileşikleri (QAC'ler) sayesinde etkilidir.
- Uyumluluk: İyonik olmayan bileşenleri sayesinde diğer dezenfektanlarla birlikte kullanıma uygundur.
- Güvenlik: Nötr pH (7), düzenli kullanıma uygundur.
- Çok Yönlülük: Protein kirleticilerini parçalar, her su sertliğinde ve sıcaklığında etkilidir.

BİLEŞİMİ: Her 100 ml içeriğinde:

Aktif Maddeler:

0,25% Didecyldimethylammonium klorür

0,25% Alkildimethylbenzylammonium klorür

0,25% Alkildimethylethylbenzylammonium klorür

• Yardımcı maddeler:

Parfüm, Korozyon inhibitörü

Kompleks oluşturuucu madde.

Mikroorganizmalar	Uygulama Alanı	Uygulama Aralığı
S.Aureus(ATCC 6538), Paeruginosa (ATCC 15442), E.hirae(ATCC 10541), E. coli (ATCC 10536)	Yüzeyler — Püskürtme ile işleme	1 dakika
C.Albicans (ATCC 10231), A.Brasiliensis (ATCC 16404)		5 dakika

Ürün Kodu: ACX02.111.5 ACX02.111.900ML
Ambalaj: 5 L (5 Kg) 900 ml (900 g)
Koli içi: 4 adet 12 adet





Acidex AL 400

Antibakteriyel Antifungal Hızlı Yüzey Temizleyici Alkol Bazlı

Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılabilen, cilde zarar vermeyen, neme ve alkole dayanıklı, antibakteriyel ve antifungal temizleyicidir.

- Hızlı Etkili: Kritik koşullarda hızlı dezenfeksiyon için 30 saniyede antimikrobiyal ve antifungal etki sağlar.
- Güvenlik: Formül sağlık ve çevre açısından güvenlidir.
- Uyumluluk: Yatay ve dikey olmak üzere çeşitli yüzeylerde kapsamlı temizlik için uygundur.
- Rensiz ve kokusuzdur: Koku ve kalıntı bırakmaz, her şeyi temiz tutar.

BİLEŞİMİ: Her 100 ml içeriğinde:
Aktif Maddeler:
50 g etanol
10 g 2-propanol
0,25 g didesildimetilben-
zilamonyum klorür.

Uygulama Alanı	Mikroorganizmalar	Uygulama Yöntemi	İletişim Süresi	Uygulama Aralığı
Tıbbi tesislerde zemin ve yüzey temizliğinde kullanılır. Durulama gerektirmez. Kalifiye personel tarafından kullanılmalıdır.	Staphylococcus aureus ATCC 6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Enterococcus hirae ATCC 10541	Seyreltilmeksizin yüzeylere püskürtülerek uygulanır.	15 dakika	İhtiyaç halinde kullanılabilir.
	Candida albicans ATCC 10231 Aspergillus brasiliensis ATCC 16404			

Ürün Kodu: ACX02.010.5 ACX02.010.750ML
Ambalaj: 5 L (4,5 Kg) 750 ml (675 g)
Koli içi: 4 adet 12 adet





Acidex PA Powder


Aktif Oksijen İçeren Yüksek Etkili Toz Dezenfektan

Cerrahi, anestezi aletleri ve endoskopların sekonder ve derin hijyenik temizliğinde kullanıma uygun, perasetik asit esaslı konsantre toz temizlik maddesidir.

- Etkili Sterilizasyon: Cerrahi alet ve tıbbi cihazların hızlı ve son derece etkili sterilizasyonunu sağlayarak güvenliği garanti eder.
- Enzimatik Güç: Fosfonatlar, enzimler (amilaz, lipaz, proteaz) ve korozyon inhibitörlerinin kombinasyonu dezenfeksiyonu artırır ve ekipmanı korur.
- Güvenli ve güvenilir: Manuel temizlik ve ultrasonik temizleyiciler için uygundur, her koşulda güvenilir sonuçlar sağlar.

BİLEŞİMİ:

- Potasyum Peroksimonosülfat bisülfat
- Sodyum Perkarbonat
- TAED
- Enzimler (Amilaz, Lipaz, Proteaz)
- Korozyon inhibitörü
- Reaksiyon sonucu oluşan Perasetik Asit ≤ 2000 ppm.

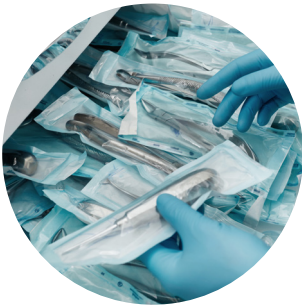

Ürün Kodu: ACX02.110.1 ACX02.110.5
Ambalaj: 1 Kg 5 Kg
Koli içi: 12 adet 4 adet



Acidex **Dental FD 44**

Diş Kliniklerinde Kullanılan Alet, Ekipman Ve Yüzeyler için Dezenfektan

Tıbbi aletler, minimal invaziv cerrahi aletler, her türlü endoskop (esnek olanlar dahil), anestezi ekipmanları, ısıya dayanıklı ve ısıya dayanıklı olmayan malzemeler, dezenfeksiyon banyoları, el tipi yıkama makineleri, ultrasonik yıkama makineleri ve endoskopik yıkama makinelerinin dezenfeksiyonu ve temizliği için uygundur.

- Geniş Spektrumlu Kullanım: Fleksibl endoskoplar, cerrahi aletler ve makineler için uygundur. HBV/HIV ve tüberküloza karşı etkilidir.
- Güçlü ve Koruyucu Formül: %14 aktif amin ve %12,6 kuaterner bileşik ile hızlı dezenfeksiyon, korozyon önleyici içerik.
- Hızlı ve Esnek Uygulama: %4'lük solüsyonla 5 dakikada etki. Düşük konsantrasyonlarla da güçlü temizlik.

BİLEŞİMİ: Her 100 ml içeriğinde:

Aktif Maddeler:

%12,6 didecylmethyl polyethoxy ammonium propionate

%14 bis(3-aminopropyl)-dodecylmine

Yardımcı maddeler: Korozyon inhibitörü, yüzey aktif maddeler.

Konsantrasyon →	4%	2%	1%
Temas süresi	5 dk.	15 dk. tüberküloz öldürücü etki	15 dk. tüberküloz öldürücü etki olmadan
Virüs İnaktivasyonu (HBV/HIV)			15 dk.

Ürün Kodu: ACX02.109.5
Ambalaj: 5 L (5 Kg)
Koli içi: 16 adet





Acidex PK 01


Cerrahi Aletler için Pas Sökücü Ve Korozyon Önleyici

Kullanılmış cerrahi aletleri pas, korozyon ve renk bozulmalarından aletlere zarar vermeden temizlemek için tasarlanmış konsantre, kullanıma hazır sıvı formüldür.

- **Leke Çıkarma:** Cerrahi aletlerde uygunsuz temizlik, kimyasal dumanlar ve ilaçlardan kaynaklanan pası ve renk bozulmasını etkili bir şekilde giderir.
- **Yüzey Koruma:** Paslanmaz çeliğin renk bozulmasını önlemek için inhibitörler içerir.
- **Organik asitler:** Aktif asidik bileşenleri sayesinde pası etkili bir şekilde temizler.
- **Kolaylık:** Çözeltiyi hazırlamak için özel bir sıvıya ihtiyaç duyulmaz.

BİLEŞİMİ:

- Organik asitler
- Yüzey aktif maddeler
- İnhibitörler.

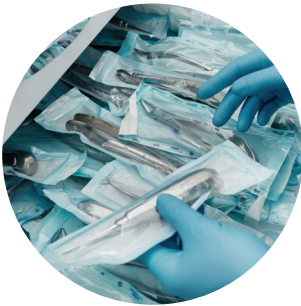

Ürün Kodu: ACX11.001.1
Ambalaj: 1 Kg (0,91 L)
Koli içi: 16 adet





Acidex **FY 90**

Cerrahi Aletler için Yağlayıcı

Cerrahi ve diş hekimliğinde aletlerin yüzey bakımı ve korunması için kullanılan yağlayıcıdır, paslanmayı, aşınmayı, kirlenmeyi ve kararmayı önler, aletlerin rahat hareket etmesini sağlar.

- Temizler ve Ömrünü Uzatır: Paslanmayı, aşınmayı ve lekeleri önleyerek cerrahi ve diş hekimliği aletlerinin ömrünü önemli ölçüde artırır.
- Güvenilir Çalışma: Etkili yağlama sağlayarak, çalışma sırasında aletlerin düzgün ve hassas hareket etmesini sağlar.
- Kalıntısız Temizlik: Otomatik yıkama makinelerinin son durulama adımında tamamen durularak kalıntı bırakmaz.

BİLEŞİMİ:

- Parafin yağları
- Emülgatör
- Korozyon önleyici.



Ürün Kodu:	ACX11.003.5	ACX11.003.1
Ambalaj:	5 L (5 Kg)	1 L (1 Kg)
Koli içi:	4 adet	16 adet



Acidex **Endex Liquid**

Tıbbi Aletlerin Ön Temizliği için Konsantre Enzim Solüsyonu

Tıbbi ve cerrahi aletler, ısıya dayanıklı ve dayanıksız malzemeler için korozyon inhibitörleri içeren, aldehit ve fenol içermeyen yüksek konsantreli temizleyicidir.

- Güçlü Temizlik: Organik ve inorganik kirleri, kanı, proteinleri, yağları ve kalıntıları etkili bir şekilde çözer ve temizler, yüzeylerde hijyenik bir temizlik sağlar.
- Verimlilik ve ekonomi: Manuel temizliği hızlandırır, aşırı köpük oluşturmaz ve kolayca durulanır, ekonomik tüketim sağlar.
- Güvenlik: Paslanmaz çeliğin kararmasını önler, paslanmaz.
- İz bırakmaz: İz bırakmaz, temiz ve hijyenik yüzeyler sağlar.

BİLEŞİMİ:

- Enzimler (amilaz, lipaz, proteaz, selü-laz, karboksihidrolaz)
- Monopropilen glikol
- Noniyonik yüzey aktif madde
- Korozyon inhibitörü.



Ürün Kodu:	ACX11.002.1	ACX11.002.5
Ambalaj:	1 Kg (0,91 L)	5 Kg (4,55 L)
Koli içi:	12 adet	4 adet



Fastec **Power 300**

Yıkama ve Dezenfeksiyon Makineleri için Alkali Temizleyici

Yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde tıbbi alet, endüstriyel ve laboratuvar cam malzemelerinin temizlenmesi için sıvı, alkalik yapıda genel temizleyicidir.

- Yüksek su sertliğinde etkilidir: Yüksek su sertliğinde bile tam temizlik sağlar.
- Güvenlik: Köpük emici ve korozyon inhibitörleri içerir, aşırı köpürmeyi önleyerek makine parçalarının hasar görmesini önler.
- Geniş uygulama alanı: Tıbbi cihazların yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde, endüstriyel ve laboratuvar cam eşyalarında kullanılır.

BİLEŞİMİ:

- Sodyum hidroksit
- Noniyonik yüzey aktif madde
- EDTA.



Ürün Kodu: FTC02.079.5
Ambalaj: 1 Kg (0,95 L)
Koli içi: 12 adet





Acidex H912

Ameliyat Sterilizatörü ve Patoloji Otoklavı için %37'lik Formaldehit Çözeltisi

Cerrahi aletler için sterilizatörlerde ve patoloji için otoklavlarda hem sıvı hem de gaz formunda kullanılan, dezenfektan ve sterilizasyon etkisine sahip yüksek etkili çözelti.

- Sporisidal ve biyosidal özellikler: Etkili dezenfeksiyon için yüksek özelliklere sahiptir ve çeşitli tıbbi malzemelerle uyumludur.
- Stabilite: Çökelmeyi, çamur oluşumunu ve donmayı önlemek için metanol (%10-15) ile stabilize edilmiştir.
- Saflık: Avrupa menşei ürün olup, formaldehit saflığı %36-38'dir.
- Çözünürlük: Renksiz, keskin kokulu, alkol, su ve eterde çözünür.

Asitlik (formik aside göre)	: 0,025
Demir (Fe)	: maks. 0,8 ppm
APHA'ya göre renk	: maks. 10
pH	: 2,5-4,10

BİLEŞİMİ: Her 100 ml içeriğinde:

Aktif Maddeler:

- \geq %37 formaldehit
- \geq %10 metil alkol.



Ürün Kodu: FRM11.002.400ML
Ambalaj: 400 ml (400 g)
Koli içi: 30 adet



Professional
Hygiene Solutions



İst. Deri Org. Yan San. Bölğ.
Tabakhane Cad. No:24 YB-18
Aydınlı Tuzla / İSTANBUL- Türkiye

Phone: +90(216)349 31 09
Mobile: +90 533 698 9169
export@faberkimya.com.tr

Distributor
